


VivaLIFT!®

POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.

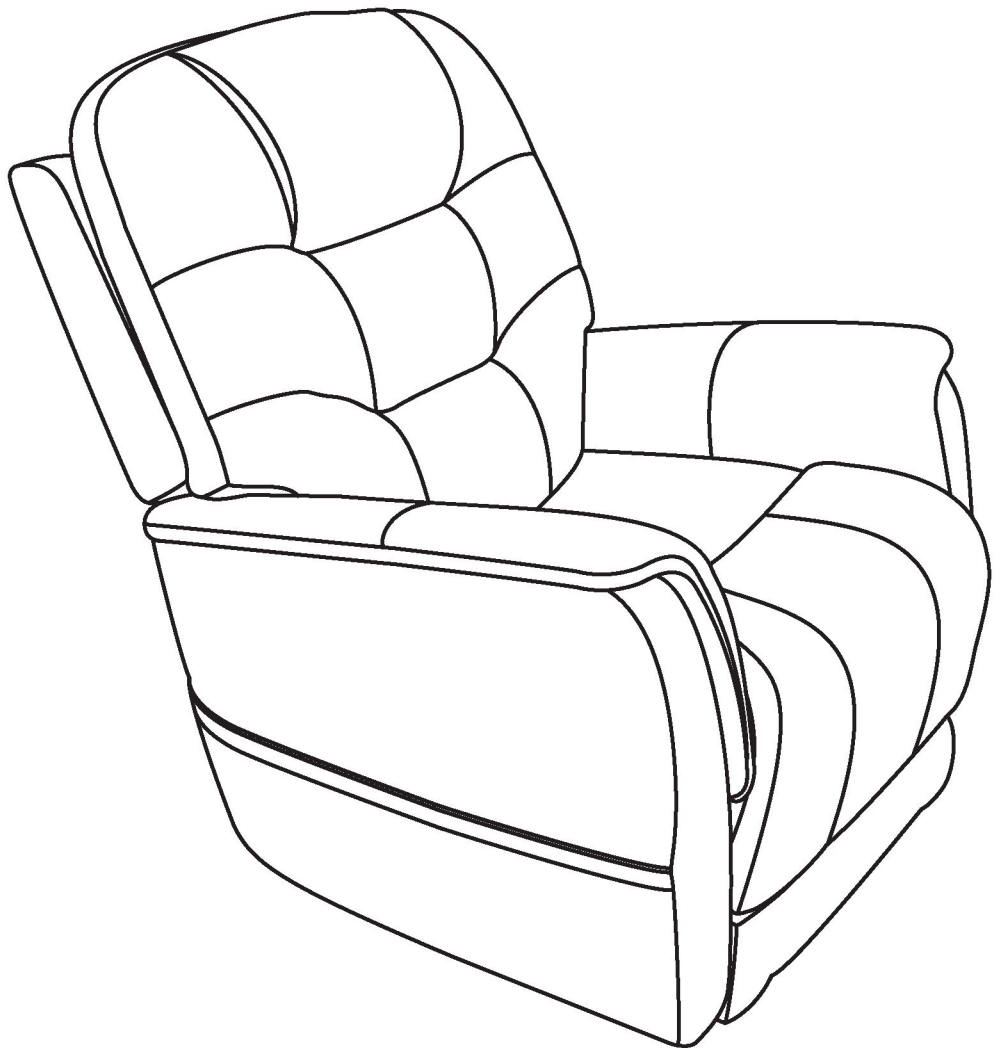

In diesem Dokument enthalten: Referenzhandbuch für den Handschalter, Stoffpflege, Montage und Einrichtung des Aufstehsessels, Garantie und Gewichtskapazität

HINWEIS: Diese Kurzanleitung enthält grundlegende Informationen zum Handschalter, zur Pflege, zur Montage und zur Gewichtskapazität Ihres Aufstehsessels. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung und alle ergänzenden Dokumente sorgfältig durch, um sich über Sicherheit, Bedienung, Pflege und Wartung zu informieren.

Die Abbildungen zeigen die Handschalter mit dem höchsten Funktionsumfang. Der erhaltene Handschalter kann weniger Optionen aufweisen, bietet jedoch die gleiche Grundfunktionalität.

Das Besondere am VIVALIFT!® Power Recliner ist die unabhängige Verstellbarkeit von Fußstütze und Rückenlehne, um Ihre individuelle Komfortposition zu finden. Sie können Ihre Füße und Ihren Rücken separat einstellen, um die ideale Position zu erreichen. Sie können die Rückenlehne beispielsweise bis zum vollständigen Liegen verstellen. Halten Sie dazu die Taste „8“ gedrückt, wie in **Abbildung 1** gezeigt, bis die Rückenlehne in die gewünschte Position geklappt ist.

IDENTIFIKATIONSSCHLÜSSEL FÜR DIE HANDBEDIENUNG

1. USB ANSCHLUSS

Zum Anschließen/Laden von USB-fähigen Geräten.



WARNUNG! Verwenden Sie NUR MFI-zertifizierte Kabel zum Aufladen von iPhones. Die Verwendung von nicht MFI-zertifizierten Kabeln kann zu Schäden am Gerät oder am Ladesystem führen.

2. KOPFSTÜTZE IN TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Kopfstütze nach innen zu bewegen.

3. KOPFSTÜTZE OUT TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Kopfstütze nach außen zu bewegen.

4. LENDENWIRBELSTÜTZE IN TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Lendenwirbelstütze nach innen zu bewegen.

5. LENDENWIRBELSTÜTZE OUT TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Lendenwirbelstütze nach außen zu bewegen.

6. UP TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um alle elektrischen Optionen des Aufstehsessels in die neutrale Position zu bringen und gleichzeitig in eine aufrechte Position gehoben zu werden.

7. DOWN TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um den Aufstehsessel in eine sitzende oder zurückgelehnte Position abzusenken.

8. TASTE ZUM NEIGEN DER SITZLEHNE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Rückenlehne zurückzulehnen.

9. TASTE ZUM ANHEBEN DER SITZLEHNE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Rückenlehne anzuheben.

10. BEINSTÜTZE UP-TASTE

Drücken und halten Sie diese Taste, um die Beinstütze anzuheben.

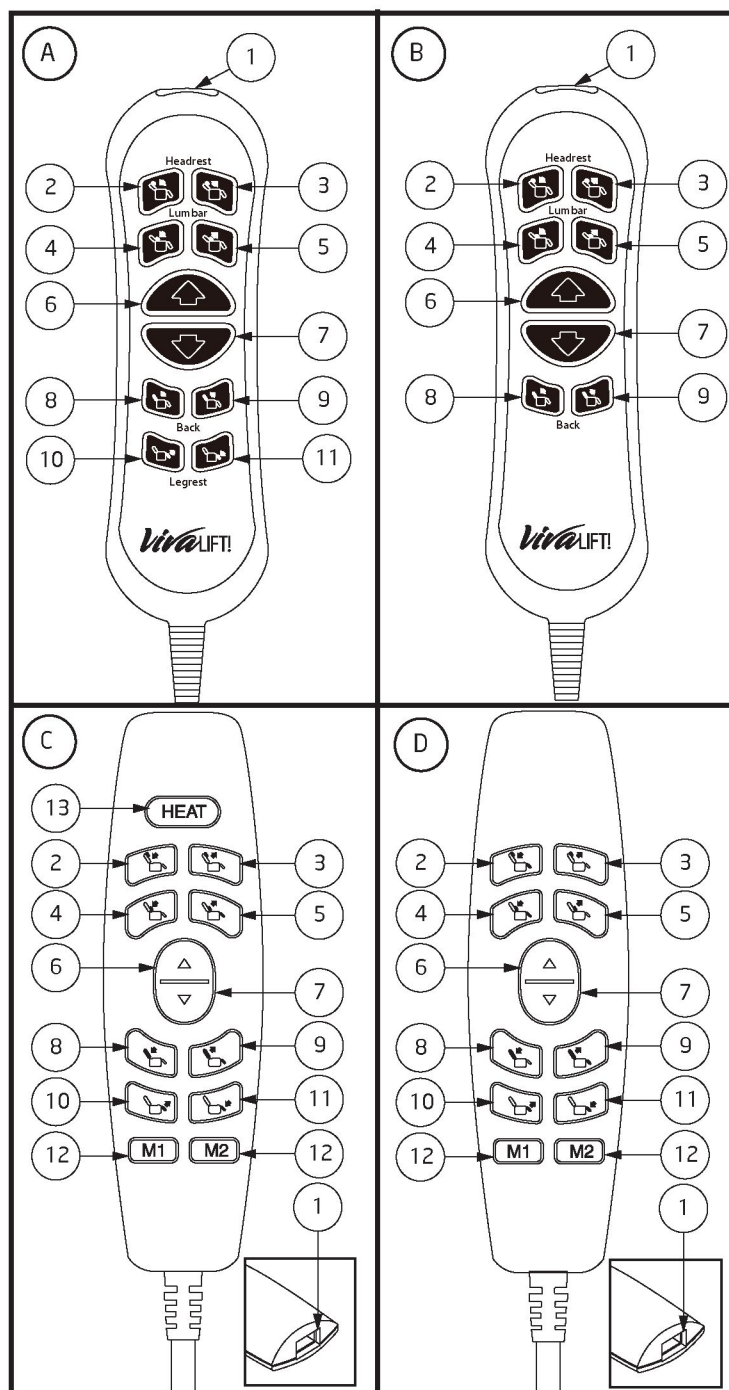


Abbildung 1. Handschalter

11. BEINSTÜTZE DOWN-TASTE

Drücken und halten, um die Beinstütze abzusenken.

12. SPEICHERTASTEN (NUR HANDBEDIENUNG C)

Drücken und halten Sie die Speichertaste 1 und die Speichertaste 2. Die LEDs auf den Speichertasten blinken, um anzuzeigen, dass sich die Handbedienung im „Set“-Modus befindet. Halten Sie die gewünschte Memory-Taste gedrückt, um die Memory-Position einzustellen. Die LEDs hören auf zu blinken. Um zu einem voreingestellten Speicherplatz zu gelangen, halten Sie die gewünschte Speichertaste gedrückt.

13. WÄRMEREGULIERUNGSTASTE (NUR HANDBEDIENUNG C)

Drücken Sie die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie die HEAT-Taste erneut, um die Intensität zwischen LOW, HIGH und OFF zu wechseln.

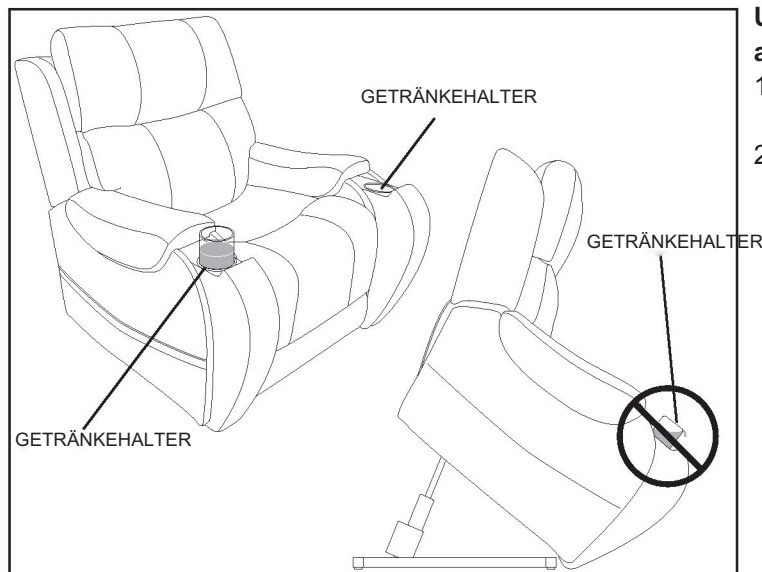


Abbildung 2. Getränkehalter

Um ordnungsgemäß von Ihrem Aufstehsessel aufzustehen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Aktivieren und halten Sie die UP-Taste (Schalter), um den Aufstehsessel anzuheben.
2. Lassen Sie den Schalter los, wenn der Aufstehsessel eine Höhe erreicht hat, in der Sie bequem aufstehen können.

WARNUNG! Versuchen Sie nicht aufzustehen, solange Sie sich nicht sicher fühlen, einen festen Stand haben und körperlich belastbar sind. Pride empfiehlt die Verwendung von Hilfsmitteln und/oder einer Begleitperson, um mehr Stabilität zu gewährleisten.



WARNUNG! Vermeiden Sie es, Ihr gesamtes Gewicht auf die Armlehnen des Aufstehsessels zu verlagern, während Sie versuchen aufzustehen, und benutzen Sie die Armlehnen nicht zum Tragen von Lasten.

Wenn Ihr Aufstehsessel mit Getränkehaltern ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass die Getränkehalter leer sind, bevor Sie Ihren Aufstehsessel aus einer sitzenden Position in eine stehende Position bringen. **Siehe Abbildung 2.**



WARNUNG! Der Inhalt des Becherhalters kann sich verschieben oder verschüttet werden, wenn der Aufstehsessel angehoben wird. Entfernen Sie den gesamten Inhalt, bevor Sie Ihren Aufstehsessel anheben. Wenn Sie nicht den gesamten Inhalt aus den Getränkehaltern entfernen, bevor Sie Ihren Aufstehsessel über eine sitzende Position hinaus anheben, kann dies zu Verletzungen oder Sachschäden führen.


WARNUNG! Legen Sie NIEMALS brennende Tabakwaren in die Becherhalter und versuchen Sie nicht, die Becherhalter als Aschenbecher zu verwenden.

ANWEISUNGEN ZUR PFLEGE DES STOFFES

HINWEIS: Lesen Sie den Abschnitt „Pflege und Wartung“ in der Bedienungsanleitung, die Ihrem Aufstehsessel beiliegt, um sich über die Pflege von Stoffen und Elektronik sowie über Entsorgung und Recycling zu informieren.

MONTAGE UND EINRICHTUNG DES AUFSTEHSESSELS


1

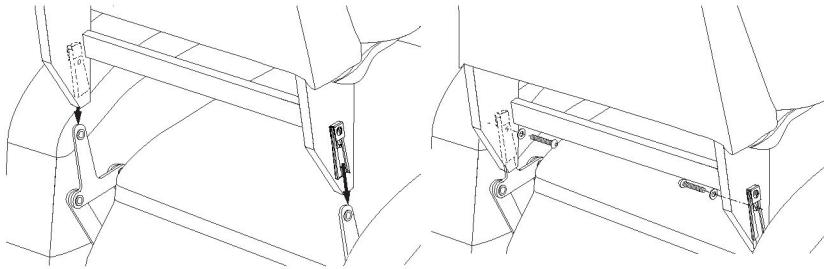

Packen Sie den Aufstehsessel aus. Legen Sie den Handschalter auf die Basis des Aufstehsessels.

Legen Sie den Aufstehsessel mit der Vorderseite nach unten auf den Sockel und führen Sie alle Kabel wie gezeigt durch den Kabelzugang.

2

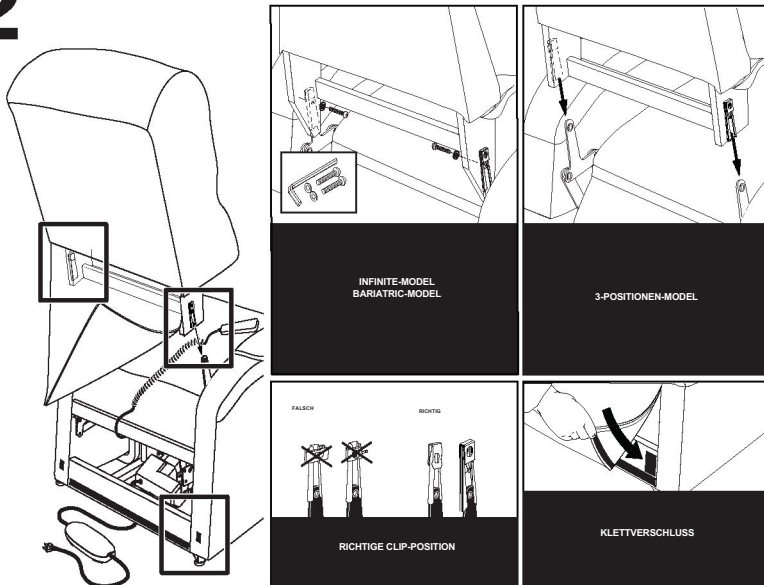

HINWEIS: Wenn es sich bei Ihrem Aufstehsessel um ein Infinite-Modell handelt, beachten Sie die Montageanleitung, die dem Aufstehsessel beiliegt. Bei einem 2-Positionen-Modell befinden sich die KD-Hülsen auf der Innenseite.

- Überprüfen Sie, ob sich der Verriegelungsclip an der Rückseite des Aufstehsessels in der senkrechten Position befindet. Falls erforderlich, neu positionieren.
- Führen Sie den Handschalter und das Kabel über die Aufstehsesselbasis und schieben Sie dann die Rückenlehne auf die Basis. Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Handschalters durch die Rückseite des Aufstehsessels geführt wird.


HINWEIS: Je nach Breite des Aufstehsessels müssen Sie möglicherweise jeweils eine Seite der Rückenlehne einschieben. Richten Sie in diesem Fall die Rückenlehne aus, bevor Sie sie nach unten drücken, um sie zu verriegeln.

- Drücken Sie fest auf die Oberseite der Rückenlehne, um sie einzurasten. Sie sollten auf jeder Seite des Aufstehsessels ein Klicken hören, um sicherzustellen, dass die Rückenlehne ordnungsgemäß eingerastet ist.

HINWEIS: Ziehen Sie an der Rückenlehne nach oben, um sicherzustellen, dass sie eingerastet ist.



- Stecken Sie die Anschlüsse für die Lendenstütze und die Kopfstütze ein. Wenn Ihr Modell nur eine Kopfstütze hat, müssen Sie nur die Kopfstütze anschließen.

3

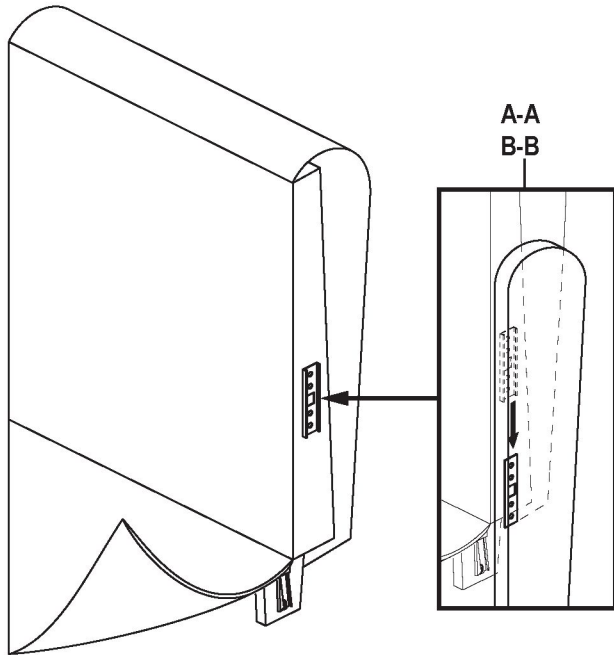


1. Wenn Ihr Modell über hintere Flügel verfügt, richten Sie die KD-Hülsen aus und schieben Sie den Flügel nach unten in seine Position. Bitte beachten Sie, dass sich auf den Klammern ein Etikett befindet. Bitte setzen Sie sie wie angegeben zusammen (A-A und B-B).
2. Verbinden Sie das Kabel des Netztransformators mit dem entsprechenden Stecker, der von der Rückseite des Aufstehsessels kommt.
3. Schließen Sie das Netzkabel an den Netztrafo an.
4. Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose in der Nähe des Ortes an, an dem der Aufstehsessel benutzt werden soll.

4

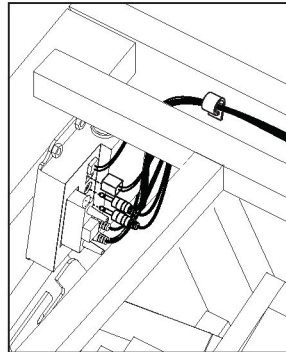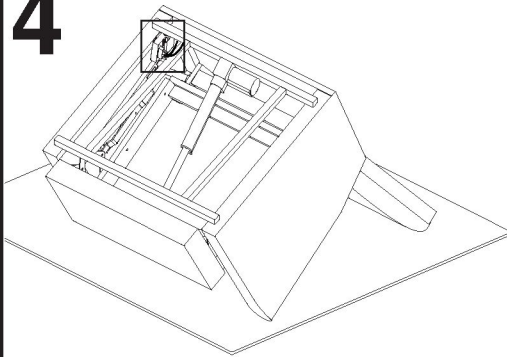

Stellen Sie den Aufstehsessel auf den Kopf und suchen Sie die Anschlussdose in der hinteren Ecke. Ziehen Sie die Kabel vorsichtig heraus und stecken Sie zuerst die drei kleinen Kabel ein. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel entlang des Aufstehsesselrahmens und nicht durch den Mechanismus verlegt sind, und befestigen Sie die Kabel mit Clips am inneren Aufstehsesselrahmen.

5

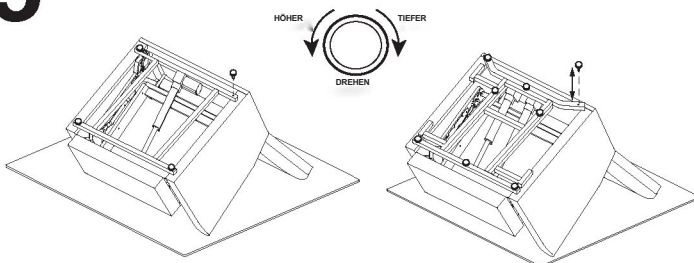

Stellen Sie den Aufstehsessel auf den Kopf, setzen Sie die Nivellierer ein, falls sie nicht bereits installiert sind, und ziehen Sie jeden Nivellierer gleichmäßig fest. Stellen Sie den Aufstehsessel wieder in die aufrechte Position. Wenn Ihr Aufstehsessel wackelt, stellen Sie die Nivellierer nach Bedarf ein (zum Absenken festziehen oder zum Anheben lockern), bis der Aufstehsessel stabil steht.


HINWEIS: Je nach Bausatz und Aufstehsesselmodell verfügen Sie über vier oder acht Nivellierfüße.

HINWEIS: Die Niveauregulierung für die Beine ist NICHT nur beim Aufstehsesselmodell PLR3955LT vorinstalliert. Bei allen anderen Modellen ist die Nivellierung der Beine bereits installiert und muss nur noch vor dem Gebrauch eingestellt werden.

6

Identifikationsschlüssel

1. STEUERUNGSBOX

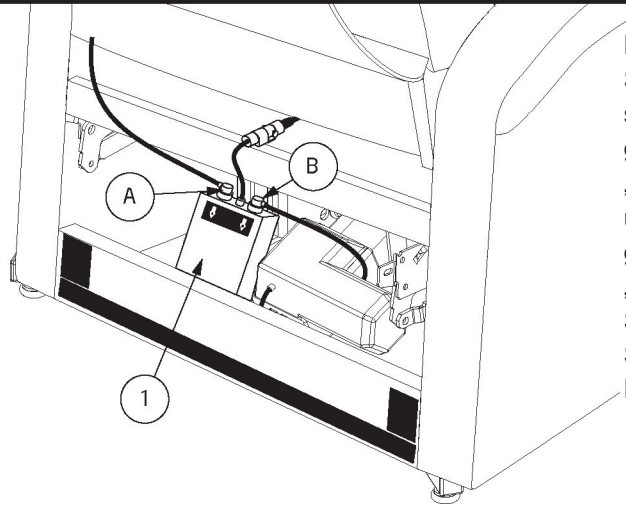


Bei Stühlen, die mit einer Steuerbox ausgestattet sind, stecken Sie das mit „A“ gekennzeichnete Kabel in den „A“-Anschluss der Steuerbox und das mit „B“ gekennzeichnete Kabel in den „B“-Anschluss der Steuerbox. Stecken Sie das Kabel des Steuergeräts in den mittleren Drahtanschluss.

7



TIPP: Um eine qualitativ hochwertige Lieferung Ihres neuen Aufstehsessels zu gewährleisten, haben wir ein maßgeschneidertes Verpackungssystem entwickelt, das Sie vor möglichen Schäden schützt, die während des Transports und der Handhabung Ihres Produkts auftreten können. Infolgedessen könnten die zum Schutz des Produkts verwendeten Verpackungskomponenten dazu führen, dass die Fasern in der Polsterung beim Auspacken unformig erscheinen. Sollte dies bei Ihnen der Fall sein, empfehlen wir Ihnen, die Aufstehsesselkissen aufzulockern, damit Luft in die Fasern des Kissens gelangt. Dieser Vorgang bringt die Kissen in ihre ursprüngliche Form zurück.


8

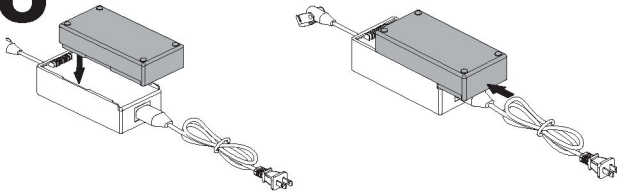

INSTALLATION LITHIUM-IONEN-AKKU-PACK

Ihr Aufstehsessel ist mit einem Lithium-Ionen-Batteriesicherungssystem ausgestattet. Vergewissern Sie sich, dass es korrekt auf dem externen Transformator installiert ist.

HINWEIS: Laden Sie den Lithium-Ionen-Akkupack vor der ersten Benutzung vollständig auf. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die LED-Anzeige auf dem Akku grün leuchtet.

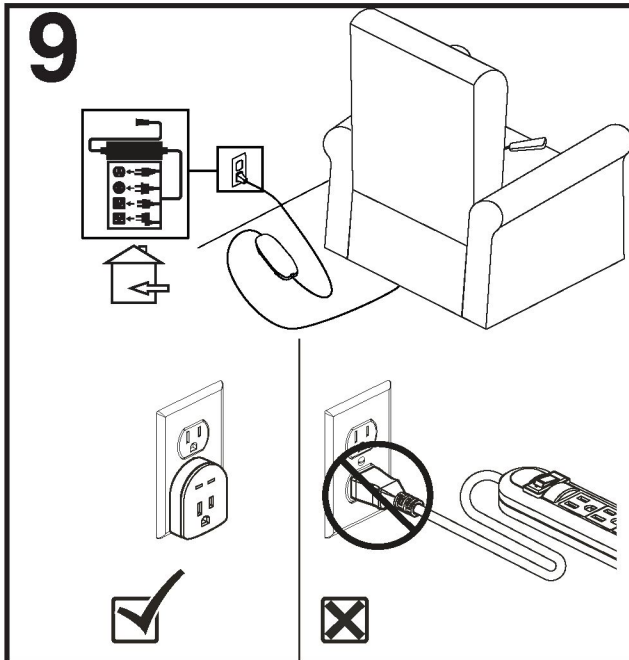

Stecken Sie das vom externen Transformator kommende Netzkabel direkt in eine normale Steckdose. Führen Sie das Netzkabel durch die Rückenlehne des Aufstehsessels. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.



WARNUNG! Schließen Sie kein Verlängerungskabel an den AC/DC-Wandler oder das Batterieladegerät an. Verwenden Sie stattdessen einen Überspannungsschutz, der entweder von AUL gelistet oder von UL anerkannt ist und über eine Schutzleistung von mindestens 1000 Joule verfügt. Der Überspannungsschutz muss direkt in eine Steckdose eingesteckt werden.

LEBENS-LANGE GARANTIE

Pride bietet eine lebenslange Garantie auf den Hebe- und Liegemechanismus sowie den Aufstehsesselrahmen. Pride garantiert, dass der Hebe- und Verstellmechanismus und der Aufstehsesselrahmen Ihres Aufstehsessels bei normalem Gebrauch und normaler Wartung frei von Mängeln sind, solange der Aufstehsessel vom ursprünglichen Besitzer benutzt wird. Diese lebenslange Garantie deckt den Hub- und Liegemechanismus gegen Metaller-müdung, defekte Schweißnähte und Buchsen ab.

HINWEIS: Pride behält sich das Recht vor, nur die Teile des Hebe- und Verstellmechanismus, der Schere(n) oder des Aufstehsesselrahmens zu ersetzen, die aufgrund von Verarbeitungsfehlern defekt sein könnten. Fehlgebrauch und/oder Missbrauch sind von der Garantie ausgeschlossen.

SIEBENJÄHRIGE ANTEILIGE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Während der ersten vier (4) Jahre ab dem Kaufdatum wird Pride nach eigenem Ermessen jeden der folgenden Teile reparieren oder ersetzen, sofern bei einer Prüfung durch einen autorisierten Vertreter von Pride ein Material- und/oder Verarbeitungsfehler festgestellt wird:

- Motor
- Handschalter
- Transformator/Kontrollbox
- Elektrische Kopfstütze
- Elektrische Lendenstütze

Für drei (3) zusätzliche Jahre wird eine anteilige Garantie für die folgenden Teile gewährt:

- Motor
- Handschalter
- Transformator/Kontrollbox
- Elektrische Kopfstütze
- Elektrische Lendenstütze

Pride übernimmt die Garantie für diese Komponenten gemäß dem folgenden anteiligen Zeitplan:

- **Fünftes Jahr:** 25 % Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis
- **Sechstes Jahr:** 15% Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis
- **Siebttes Jahr:** 5 % Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis

LITHIUM-IONEN-AKKU

Für den Lithium-Ionen-Akku gilt eine Garantie von zwölf (12) Monaten (1 Jahr).

GARANTIEAUSSCHLÜSSE

Pride übernimmt keine Verantwortung für Stoffe.

Pride deckt keine Kosten für Arbeitsaufwand, Serviceeinsätze, Versand oder andere Kosten im Zusammenhang mit der Reparatur des Produkts. Der Käufer trägt alle Transportkosten und haftet für Transportschäden, die bei der Rücksendung von Teilen zur Reparatur oder zum Austausch auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihren autorisierten Pride-Händler, um Informationen über die aktuellen Kosten für Servicebesuche zu erhalten.

- Die Garantie gilt nicht für Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Pride liegen
- Pride schließt Arbeits-, Service-, Versand- und andere Kosten für Reparaturen aus, es sei denn, sie wurden vorher ausdrücklich von Pride genehmigt.
- Reparaturen und/oder Änderungen an Teilen ohne ausdrückliche Genehmigung von Pride sind ebenfalls ausgeschlossen

Ausgeschlossen sind auch Komponenten mit Schäden durch:

- Kontamination
- Verschüttete oder ausgelaufene Batterieflüssigkeit
- Kommerzielle Nutzung oder andere als die normale Nutzung
- Missbrauch, Fehlgebrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit
- Unsachgemäße Bedienung, Wartung oder Lagerung

STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

Im gesetzlich zulässigen Umfang sind stillschweigende Garantien, einschließlich der Garantie der Markt-gängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck, auf ein (1) Jahr ab dem Kaufdatum beschränkt. Alle anderen stillschweigenden Garantien sind ausgeschlossen. Dies ist der einzige Rechtsbehelf. Die Haftung für Folgeschäden im Rahmen jeglicher Garantien ist ausgeschlossen.

In einigen Bundesstaaten ist es nicht zulässig, die Dauer einer stillschweigenden Garantie zu beschränken oder den Ausschluss oder die Begrenzung von zufälligen oder Folgeschäden zuzulassen. Die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse gelten möglicherweise nicht für Sie.

Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch weitere Rechte haben, die je nach Bundesstaat variieren.

Ihr Aufstehsessel wurde für Ihren Komfort entwickelt. Die maximale Tragfähigkeit Ihres Aufstehsessels beträgt 400 lbs. (181 kg). Bitte beachten Sie die angegebene Gewichtskapazität Ihres Aufstehsessels.



OBLIGATORISCH! Halten Sie sich strikt an die angegebene Gewichtskapazität Ihres Aufstehsessels. Die Garantie Ihres Aufstehsessels erlischt bei Überschreitung der Gewichtskapazität.

Rev J/Dezember 2022



I N F I N I T B 3 8 3 4